



KJØR SIKKERT

Med vår billås Permolock C3, kan du nå kjøre bilen direkte fra rullestolene Permobil C300 og C350. En annen ny funksjon er at du kan rygge inn i låsen med din rullestol. Låsen kan monteres både på fører- og passasjersiden i alle slags biler som er hensiktsmessige for rullestoler. Permolock C3 kan også plasseres sidelengs bak førersetet. (NB! Uten passasjer ved kjøring). Det er da enkelt å forflytte seg til et vridbart førersete. Låsen er liten og smidig og er enkel å montere. At den er justerbar både i vinkel og høyde, letter montering av låsen, fremfor alt på vinklede gulv. Permolock C3 er dessuten servicevennlig. Takket være den smarte konstruksjonen, behøver kun lokket på låsen fjernes ved service.

PERMOLOCK
C3



Låsen består av to enheter: To låsbolter montert på undersiden av rullestolens chassis, samt en låseplate montert i bilen.



Lettinnstilt billås som holder stolen i en fast posisjon.



Låsens høyde kan stilles inn i 5 mm trinn. Vinkelstillbarheten gjør det enkelt ved vinklede gulv.



Kontrollknapp i panelet med lys som viser om stolen er korrekt låst. Kun et trykk for å frigjøre stolen.




Låsemekanismen kan åpnes manuelt med en nødspak i forkant av billåsen.

TILBEHØR



Manuell frigjøring. Det kan også monteres en manuell frigjøringsspak lett tilgjengelig for den som sitter i rullestolen.

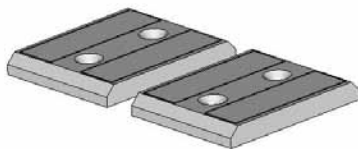

Distanseplater som brukes ved montering på vinklede gulv.



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Hvamsvingen 22,
2013 Skjetten, Norge.
Tel: 815 30 077. Faks: 63 84 48 50.
E-post: ks@permobil.no
www.permobil.no